

Zecken leben in Gärten, Dünen, auf Wiesen und im Wald. Waren Sie schon einmal in der Natur? Kontrollieren Sie sich auf Zeckenbisse!

Um die Gefahr einer Infektion zu vermindern, muss die Zecke innerhalb von 8 Stunden vollständig entfernt werden. Betäuben Sie die Zecke nicht mit Alkohol oder anderen antiseptischen Mitteln. Erhitzen Sie die Zecke auch nicht mit einer brennenden Zigarette oder anderen heißen Gegenständen. Denn wenn die Zecke betäubt oder erhitzt wird, gerät sie in einen Schockzustand und injiziert über ihren Speichel Krankheitserreger beim Wirt. Mit einer guten Zeckenzange können Sie die Zecke entfernen, ohne dass gefährliche Bakterien in deren Speichel gelangen.

Wenn Sie die Zecke entfernt haben, desinfizieren Sie die Bissstelle mit Alkohol. Notieren Sie das Datum des Zeckenbisses, wo sich die Bissstelle auf Ihrem Körper befindet und in welchem Gebiet Sie sich den Zeckenbiss zugezogen haben.

Betriebsanleitung

1. Halten Sie die Zange mit Daumen und Mittelfinger und drücken Sie mit dem Zeigefinger auf die Rückseite der Zange: Der Greifer öffnet sich nun.
2. Legen Sie die Greifzange vorsichtig über die Zecke - so nah wie möglich an der Haut - und lassen Sie die Greifzange dann schließen.
3. Ziehen Sie die Zecke dann mit ein paar vorsichtigen Ruckbewegungen gerade aus der Haut.
4. Desinfizieren Sie die Bissstelle und notieren Sie das Datum des Bisses in Ihrem Tagebuch.

PRODUKTSPEZIFISCHE ANGABEN

Artikelnummer
38395

EAN
8714024383958

Gewicht
25 g

Verpackungsgröße l x b x h
30 x 80 x 135 mm

Bestellmenge
6



KURZ GESAGT

- Entfernt eine Zecke schnell, sicher und einfach
- Speziell entwickelte Greifbacken (auch für Nymphen)
- Minimales Risiko, die Zecke zu beschädigen
- Enthält zwei Alkoholtupfer zur Desinfektion der Bissstelle