

Zecken leben in Gärten, Dünen, auf Wiesen und im Wald. Waren Sie schon einmal in der Natur? Kontrollieren Sie sich auf Zeckenbisse!

Um die Gefahr einer Infektion zu vermindern, muss die Zecke innerhalb von 8 Stunden vollständig entfernt werden. Betäuben Sie die Zecke nicht mit Alkohol oder anderen antiseptischen Mitteln. Erhitzen Sie die Zecke auch nicht mit einer brennenden Zigarette oder anderen heißen Gegenständen. Denn wenn die Zecke betäubt oder erhitzt wird, gerät sie in einen Schockzustand und injiziert über ihren Speichel Krankheitserreger beim Wirt. Mit einer guten Zeckenzange können Sie die Zecke entfernen, ohne dass gefährliche Bakterien in deren Speichel gelangen.

Wenn Sie die Zecke entfernt haben, desinfizieren Sie die Bissstelle mit Alkohol. Notieren Sie das Datum des Zeckenbisses, wo sich die Bissstelle auf Ihrem Körper befindet und in welchem Gebiet Sie sich den Zeckenbiss zugezogen haben.

Jetzt können Sie Zecken sehr leicht entfernen mit dem Care Plus® Tick-Out Ticks-2-Go. Dieser exklusiv gestaltete Zeckenentferner verfügt über zwei Aussparungen um Zecken zu entfernen. Greifen Sie die Zecke direkt hinter dem Kopf und ziehen oder hebeln Sie die Zecke einfach ab. Mit Care Plus® Tick-Out Ticks-2-Go können Sie die meisten festgebissenen Zecke sogar komplett, also inkl. Kopf und Beine, problemlos entfernen. Care Plus® Tick-Out Ticks-2-Go übt keinen Druck auf die Zecke aus, d.h. sie wird nicht zerquetscht oder auseinander gerissen. Ticks-2-Go lässt sich leicht am Schlüsselbund befestigen, damit Sie ihn immer in Reichweite haben.



KURZ GESAGT

- Entfernt die Zecken schnell und korrekt mit einem einfachen Schleifbewegung
- Exklusiv entwickelt Instrument mit 2 Aussparungen um die Zecken zu entfernen
- Die Zecken werden nicht zerquetscht oder auseinander gerissen
- Entfernt alle Zecken jeglicher Grösse

PRODUKTSPEZIFISCHE ANGABEN

Artikelnummer
38396

EAN
8714024383965

Gewicht
25 g

Verpackungsgröße l x b x h
30 x 80 x 135 mm

Bestellmenge
6